


Anziehanleitung Spring Elegance Stütz-Strümpfe



Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von **SPRING Noppen-Handschuhen**, um das An- und Ausziehen zu erleichtern und die Strümpfe vor Beschädigungen zu schützen.

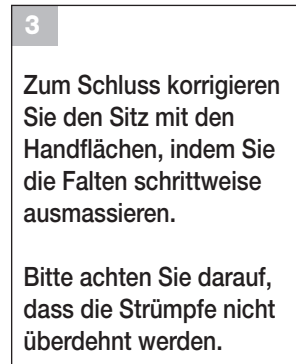

Zum **AUSZIEHEN** fassen Sie die Strümpfe am oberen Rand, ziehen sie vorsichtig bis zur Ferse herunter und streifen sie mit der flachen Hand über die Ferse.

Anziehanleitung Spring Elegance Stütz-Strumpfhosen

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von **SPRING Noppen-Handschuhen**, um das An- und Ausziehen zu erleichtern und die Strümpfe vor Beschädigungen zu schützen.

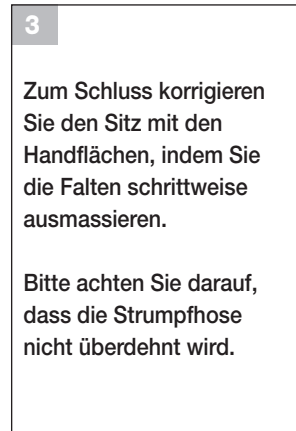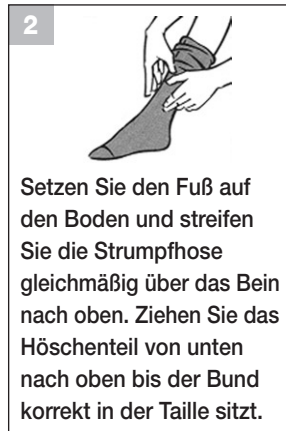

Zum **AUSZIEHEN** fassen Sie die Strumpfhose am oberen Rand, ziehen sie vorsichtig bis zur Ferse herunter und streifen sie mit der flachen Hand über die Ferse.