

Die **neue** patentierte An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe

Socks-[®]jet

So einfach gehts:



Stellen Sie den Socks-jet auf eine gerade, trockene Fläche. Der Standfuß zeigt mit dem Griff zu Ihnen. Die halbkreisförmige Rohröffnung zeigt nach vorne.



Ziehen Sie den Strumpf über den Rohrkörper. Die Strumpfspitze zeigt nach vorne.



Streifen Sie den Strumpf so weit über den Rohrand, bis das Fersengestrick am oberen Rand des Rohres erscheint.



Setzen Sie den Socks-jet vor sich auf den Boden. Gleiten Sie mit der Fußspitze in den geöffneten Strumpf. Zur besseren Standsicherheit stützen Sie sich an einem standfesten Objekt ab.



Wenn Sie mit der Ferse den Boden der Ausgleitzone erreicht haben, ist die Ferse im Strumpf positioniert.



Ziehen Sie nun den Fuß mit dem Strumpf nach oben, um aus dem Rohrkörper zu gelangen. Mit dem anderen Fuß können Sie im Bedarfsfall den Socks-jet fixieren.



Da jetzt die Ferse positioniert ist, streifen Sie den Strumpf mit den Händen weiter hoch bis unter das Knie, oder bei Schenkelstrümpfen weiter bis zum Oberschenkel.

Tipp! Tragen Sie zur Schonung Ihrer medizinischen Kompressionsstrümpfe Gummihandschuhe, das verhindert Laufmaschen. Achten Sie auf faltenfreien Sitz und ein gleichmäßiges Maschenbild.



Socks-jet mit Haltegriffen:

- Stellen Sie den Fuß in den Socks-jet.
- Streifen Sie den Strumpf von oben über den Rohrkörper.
- Drücken Sie durch die Handgriffe die Haltebacken gegen das Rohr.
- Ziehen Sie den Fuß vorsichtig nach oben aus dem Strumpf.



Einfache Anwendung durch Hilfspersonal auch bei Bettlägigkeit.

Vertrieb:

Spring Medical
71111 Waldenbuch

Art.-Nr. ohne Haltegriffe
25.00130

Art.-Nr. mit Haltegriffen
25.00135

V070302-5