

WASH & GO

- Feinwaschmittel empfohlen
- Max. 40°C
- Keinen Weichspüler verwenden
- Nicht wringen
- An der Luft trocknen
- Direkte Hitze vermeiden
- Ringe, spitze Fingernägel oder Hornhaut können die feinen Maschen des Gewebes beschädigen! Achten Sie auch auf glattes Innenfutter der Schuhe!
- Nicht in Berührung bringen mit: Fett, Benzin, Lösemitteln, Salbenrückständen oder sonstigen aggressiven Mitteln



TAKE ON - TAKE OFF



Greifen Sie in den Strumpf, rollen ihn bis zur Spitze auf und ziehen Sie das Fußteil an.

Setzen Sie den Fuß auf den Boden und streifen Sie den Strumpf gleichmäßig über das Bein nach oben.

Korrigieren Sie den Sitz mit den Handflächen, indem Sie die Falten schrittweise ausstreichen. Achtung: Strümpfe nicht überdehnen!



Zum **Ausziehen** fassen Sie den Strumpf am oberen Rand, ziehen ihn vorsichtig bis zur Ferse herunter und streifen ihn mit der flachen Hand über die Ferse.

Unser Tipp: Verwenden Sie SPRING® Noppenhandschuhe. Sie erleichtern Ihnen das An- und Ausziehen und schützen die Strümpfe vor Beschädigungen!



Bunte Reise!



SKY SOCKS Stütz-Kniestrümpfe:
Die perfekten Reisebegleiter
für Sie und Ihn.

Ob bunt oder klassisch - mit
SKY SOCKS bleiben Ihre Beine immer
entspannt: Der effektive Druckverlauf
unterstützt Ihre Blutzirkulation und
kann Venenleiden und Reisthrom-
bosen aktiv vorbeugen.

Ideal auch für Beruf und Freizeit!

Wenn Sie die folgenden Hinweise
beachten, bleibt die Qualität Ihrer
Strümpfe lange erhalten.

Viel Spaß und bunte Reise!



Spring Medical
D-71111 Waldenbuch
www.skysocks.de




15.95*
€

- 12 tolle Farben
- UNISEX - Reisetstrümpfe für SIE und IHN
- 70 den, blickdicht

SKY SOCKS
DER REISESTRUMPF

- Intensive Stützwirkung
- Unterstützung der Blutzirkulation
- Spürbare Entlastung der Beine
- Aktive Vorbeugung von Venenleiden
- Abnehmender Druckverlauf

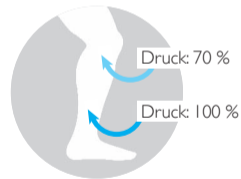

70
den

88% Polyamid + 12% Elasthan

*unverbindliche Preisempfehlung

SAND

PURPLE

OCEAN

WOOD

SAFARI

NAVY

GRAPHIT

BLACK

ORANGE

GREEN

BLUE

RED