



Spring[®]

Strumpf Anziehhilfe

Die stabile Anziehhilfe bei eingeschränkter Mobilität

Für alle Kompressionsstrümpfe mit offener und geschlossener Spitze
Stabiles und leichtes Gestell mit Haltegriffen zur leichteren Anwendung
Vereinfacht die Handhabung von Stütz- und Kompressionsstrümpfen

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Spring® medical entschieden haben und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie diese Produktinformationen sorgfältig durch.

Zweckbestimmung

Die stabile Anziehhilfe erleichtert das selbstständige Anziehen von Kompressionsstrümpfen auch bei eingeschränkter Mobilität, da die Strümpfe ohne tiefes Bücken angezogen werden können.

⚠️ Wichtige Hinweise

Die Abgabe der Anziehhilfe muss durch medizinisch geschultes Fachpersonal erfolgen. Ihr Fachhändler berät Sie auch, wie Sie Ihre Anziehhilfe richtig nutzen. Wir prüfen unsere Produkte im Rahmen einer umfassenden Qualitätssicherung. Sollten Sie dennoch Beanstandungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Reparieren Sie Schäden nicht selbst, sondern bringen Sie das Produkt zu dem Fachhändler zurück, bei dem es gekauft wurde. Ein beschädigtes oder nicht mehr einwandfreies Produkt bitte nicht mehr verwenden, um Verletzungen und/oder Schäden an den Strümpfen zu vermeiden.

Pflegehinweise

Das Produkt ist für den sofortigen Gebrauch geeignet. Bitte reinigen Sie die Anziehhilfe bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und falls nötig, mit einem milden Reinigungsmittel. Bitte testen Sie die Materialverträglichkeit von Reinigungsmitteln zunächst an einer kleinen Fläche der Anziehhilfe. Lagern Sie die Anziehhilfe trocken und geschützt vor Sonne und Hitze, möglichst in der Originalverpackung.

Materialzusammensetzung

Eisendraht, Epoxyd-Polyester-Lack, Endkappen: PVC

⚠️ Risiken und Nebenwirkungen

Bei Unverträglichkeit auf das Material der Anziehhilfe kann es bei der Verwendung zu Hautreizungen oder allergischen Reaktionen kommen. Lackschäden an der Anziehhilfe, z. B. durch Verschleiß, falsche Lagerung und Entstehung von Rost oder Verwendung ungeeigneter Reiniger, können ebenfalls zu Hautreaktionen führen. Die Anziehhilfe sollte nicht mit verletzter Haut in Berührung kommen. Wir empfehlen die Verwendung mit Spezialhandschuhen, z. B. Spring® Noppenhandschuhe. Diese helfen auch, die Kompressionsstrümpfe zu schonen.

Gewährleistung

Wir garantieren die Funktionsfähigkeit der Anziehhilfe für 5 Jahre. Nach Ablauf dieser Frist sind die Produkte von der Gewährleistung ausgenommen. Grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, welche auf üblichen Verschleiß bzw. unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Unter unsachgemäßen Gebrauch fällt auch die nachträgliche Veränderung des Produktes, welche nicht von der Herstellerfirma durchgeführt worden ist. Das Produkt ist zur Versorgung eines einzigen Patienten vorgesehen. Wird es zum Wiedereinsatz an andere Personen weitergegeben, erlischt die Produkthaftung des Herstellers.

Entsorgung

Nach Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Produkt bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Meldepflicht

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind Patienten und Anwender verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretene schwerwiegende Vorfälle, die zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod geführt haben oder hätten führen können, dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM) unverzüglich zu melden.

Anziehanleitung

⚠ Achten Sie auf einen sicheren Stand der Anziehhilfe, um ein Abrutschen beim Aufziehen des Strumpfes zu vermeiden. Bitte achten Sie auch darauf, die Hände nicht zwischen dem Einstiegsbügel und den beweglichen Griffen einzuklemmen. **Tipp:** Eine große Erleichterung beim Aufziehen und Anziehen des Strumpfes bieten Spring® Noppenhandschuhe, die zusätzlich das Gestrick schonen. ⚠ **Hinweis** Die Anziehhilfe ist für Unterschenkelumfänge bis maximal 44 cm geeignet.



1. Spring® Strumpf Anziehhilfe vorbereiten

Stellen Sie die Anziehhilfe so vor sich, dass die geschlossene Seite zu Ihnen zeigt und die Griffe oben sind. Dann stülpen Sie den Strumpf über den halbrunden Einstiegsbügel, wobei Sie den Rand des Strumpfes nach außen umschlagen. Ziehen Sie den Strumpf kraftvoll so weit über das Gestell, bis die Ferse innen sichtbar wird. Die Ferse sollte Ihnen zugewandt sein.



3. Strumpf hochziehen und anziehen

Beim Aufstehen bitte nicht auf dem Produkt abstützen! Sobald Sie sicher stehen, kippen Sie zunächst die Anziehhilfe etwas nach hinten und steigen nach vorn aus. Sie können sie nun beiseite stellen.



2. In den Strumpf steigen

Steigen Sie dann mit Ihrem Fuß in das Gestell, bis Ihre Zehen die Strumpfspitze erreicht haben und auch die Ferse richtig am Fuß positioniert ist. Führen Sie die Anziehhilfe nach oben, bis Sie den Strumpf bequem mit den Händen erreichen.



4. Strumpfmateriale verteilen

Streifen Sie zuletzt den Strumpf komplett nach oben. Verteilen Sie das Gestrick gleichmäßig, so dass der Strumpf faltenfrei anliegt. Die Spring® Noppenhandschuhe helfen Ihnen auch dabei!



Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20 | D-96052 Bamberg

Spring[®]medical

Apothekenvertrieb:

BELSANA Medizinische Erzeugnisse

Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH

Laubanger 23 | D-96052 Bamberg | service@belsana.de

