



Anziehen: so funktioniert's einfach.

Spring[®]medical


offene Spitze

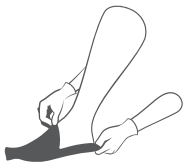

1. Beigelegte Gleitsocke mit der längeren Lasche nach unten über den Fuß ziehen.

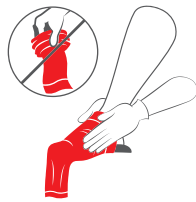

2. Strumpf über die Gleitsocke streifen, bis die Zehen und die Ferse korrekt im Strumpf sitzen.

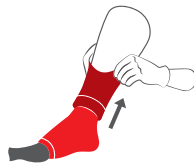

3. Strumpfmaterial etappenweise am Bein anlegen. Nicht am Strickbund/Haftband ziehen.



4. Offene Spitze zurück stülpen und Gleitsocke nach vorne herausziehen.




5. Offene Spitze wieder zurückklappen und das Material faltenfrei am Bein verteilen.


geschlossene Spitze




1. Die Ferse von innen greifen und den Strumpf bis zur Ferse auf links ziehen.

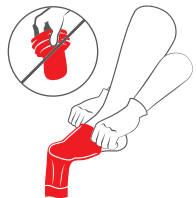

2. Das innenseitige Fußteil über die Zehen bis zum Spann ziehen.

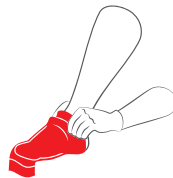

3. Strumpfmaterial in der Fußmitte greifen und über den gesamten Fuß ziehen.

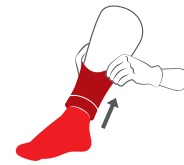

4. Strumpfmaterial etappenweise am Bein anlegen. Nicht am Strickbund/Haftband ziehen.



5. Das Material faltenfrei am Bein verteilen.

Auf die richtige Pflege kommt es an



Tägliche Wäsche, mind. jedoch jeden zweiten Tag per Hand oder in der Waschmaschine bei höchstens 40° C



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Nicht bleichen



Feinwaschmittel verwenden (z.B. Spring[®] Waschmittel), aber keinen Weichspüler



Im Schongang des Trockners oder an der Luft trocknen



Auf links waschen und trocknen



Bitte niemals bügeln



Bitte nicht auswringen und auch nicht auf die Heizung legen



Nicht chemisch reinigen



Strümpfe und Haftbänder niemals mit Lösungsmitteln, stark fettenden Salben, Lotionen und Cremes in Berührung bringen